

P0#2B0896 TMB-986 阿根廷文说明书 (A0)

印色：单黑

材质：80G书纸

尺寸：170.5*120.5mm

P0#2B0680改封底/P19/P20

CE 0123


TRANSTEK

Version:1.0

دليل المستخدم

جهاز لقياس ضغط الدم TMB - 986

مخصص للذراع

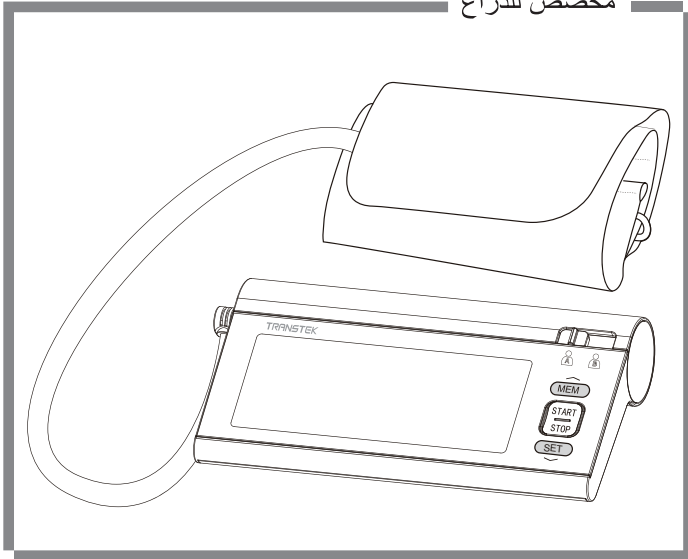

■ شكرا لك على إختيارك لجهاز TRANSTEK لقياس ضغط الدم TMB - 986

■ رجاء إقرأ دليل المستخدم بتمعن لكي يكون بإمكانك إستخدام هذا المنتج بشكل آمن، وإحفظه لكي تعود إليه في المستقبل عند الحاجة لذلك.

GUANGDONG TRANSTEK MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD
Address: Zone A, No.105 ,Dongli Road, Torch Development District,
Zhongshan, 528437, Guangdong, China

EC REP MDSS - Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

CE 0123

الفحوى

المقدمة

2.....

- وصف عام
- تعليمات السلامة
- إشارة عرض شاشة الـ LCD
- مركبات جهاز الضغط

قبل ان تبدأ

6.....

- اختيار مصدر الطاقة
- إدراج وتبديل البطاريات
- ضبط التاريخ، الوقت



القياس

10.....

- وضع كم القياس
- البدء بالقياس

إدارة البيانات

12.....

- مراجعة التسجيلات
- حذف التسجيلات

تعليمات للمستخدم

14.....

- نصائح للقياس
- الصيانة

حول ضغط الدم

16.....

- ما هو الضغط الإنقباضي والضغط الإنبساطي؟
- ما هو التصنيف العام لضغط الدم؟
- لماذا يتقلب ضغط دمى خلال النهار؟
- لماذا ضغط الدم الذى أقيسه فى المستشفى مختلف عن ذلك الذى أحصل عليه فى البيت؟
- هل تكون النتيجة متطابقة عند قياس الضغط على اليد اليمنى؟

مقدمة

18.....

الخصائص

19.....

تواصل معنا

20.....

قائمة المعايير التي يمتثل لها الجهاز

21.....

21..... دليل التوافق الكهرومغناطيسى

♥ وصف عام

شكرا لك على شرائك لجهاز TRANSTEK للنزاع لقياس ضغط الدم (TMB-986).

يعرض الجهاز قياس ضغط الدم، نبض القلب والقياسات السابقة التي تم تخزينها.

يوفر لك تصميم الجهاز سنتين من الخدمة التي يمكن الاعتماد عليها.

القياسات التي يتم قياسها باستخدام جهاز ضغط الدم TMB-986 تشبه تلك التي يتم قياسها من قبل الطواقم الطبية باستخدام كم القياس وساعة الطبيب.

يحتوي هذا الدليل على معلومات هامة للسلامة والرعاية، بالإضافة الى شرح مفصل حول كيفية استخدام لهذا الجهاز

اقرأ دليل المستخدم بعناية قبل البدء باستخدام المنتج.

الخصائص:

- شاشة LCD زرقاء بطول 128 × 50 ملم مع إضاءة خلفية بيضاء.
- مفتاح حساس للمس
- إمكانية الاستخدام من قبل شخصين
- تسجيل حتى 60 قياس لكل مستخدم.
- تقنية قياس الشحن

♥ تعليمات السلامة

الإشارات التالية قد تظهر في دليل المستخدم، علامات التعريف أو المركبات الأخرى.

إنها المتطلبات المعيارية للإستخدام.

	رمز لـ "يجب قراءة دليل المستخدم"		رمز لـ "نوع الـ BF المرفق بالجهاز"
	رمز لـ "يمثل متطلبات المعايير MDD93/42/EEC"		رمز لـ "حماية بيئية"
	رمز لـ "الشركة المصنعة"		النفائات الإلكترونية يجب ان لا يتم التخلص منها في النفايات المنزلية. رجاء اتباع التعليمات المحلية"
	رمز لـ "الرقم التسلسلي"		SN
	رمز لـ "تيار مباشر"		EC REP
	رمز لـ "تاريخ التصنيع"		



تحذير

هذا الجهاز مخصص للإستخدام من قبل الاشخاص البالغين فقط.

الجهاز مخصص لقياس ورصد غير اجتياحي لضغط الدم في الشرايين.

الجهاز غير مناسب للإستخدام على أطراف أخرى من الجسم بإستثناء الذراعين أو لإستخدامات أخرى بإستثناء قياس ضغط الدم.

لا تخطأ ما بين مراقبة شخصية وتشخيص شخصي. تسمح لك وحدة القياس برصد ضغط دمك.

لا تبدأ أو تتوقف عن أي علاج بالإعتماد فقط على نتائج الفحص قبل مراجعتك للطبيب.

إذا كنت تتعاطى الأدوية، استشر طبيبك لتحديد أفضل وقت مناسب لقياس ضغط دمك.

لا تقم أبدا بتغيير الدواء الموصوف لك دون إستشارة الطبيب.

هذه الوحدة غير مناسبة للرصد الدائم عند الكوثر في وحدة العناية المكثفة أو في العمليات الجراحية.

إذا تعدى ضغط الدم الـ 300mmHg ، ستكتمش الوحدة تلقائيا.

إذا لم ينكمش كم القياس بعد ان تخطى الضغط الـ 300mmHg ، قم بفصل كم القياس عن الذراع وإضغط على الزر لتوقف عملية النفخ.

لتجنب القياسات الخاطئة، اقرأ بتمعن دليل المستخدم هذا قبل إستخدامك للمنتج.

الجهاز ليس بجهاز AP/AGP وليس مناسباً للإستخدام بوجود خليط لمادة مخدرة قابلة للإشتعال مع الهواء أو مع أوكسيد النيتروس.

يمنع على مشغل الجهاز لمس المحول الكهربائي والمريض في نفس الوقت.

لتجنب القياسات الخاطئة، الأخطاء، رجاء تجنب الحقول الكهرومغناطيسية القوية أو الإشارات الكهربائية السريعة عند إستخدامك لمحول التيار الكهربائي المباشر.

يجب على المستخدم أن يتأكد من أن الجهاز يعمل بشكل جيد وأمن وفي ظروف ملائمة قبل البدء باستخدامه.

إنبيه إلى أنه لا يتم إستخدام موصلات يور LUER هذا المنتج ورجاء لا تقم بأي تغيير في الموصلات المرفقة. لا تنثني أنبوب الهواء في طرفه.

رجاء إستخدام الملحقات والأجزاء القابلة للفصل المعدة خصيصاً لموافق عليها من قبل الشركة المصنعة.

غير ذلك، قد يحدث ضرر للوحدة أو خطر على حياة المستخدم أو المريض.

ستقدم الشركة عند طلبها بذلك رسم للدوائر الكهربائية، قائمة المركبات وما شابه ذلك.

هذه الوحدة غير مناسبة للرصد الدائم عند الكوثر في وحدة العناية المكثفة أو في العمليات الجراحية.

بعد ان نفخ كم القياس لفترة طويلة، على ذراع المريض سيشعر المريض بتخدر الذراع والأصابع بالإضافة الى الألم والتورم.

رجاء إستخدام الجهاز تحت الظروف المسجلة في دليل المستخدم.

وإلا، سيؤثر ذلك على أداء وعمر الجهاز .

خلال الاستخدام ستلاص الكم ذراع المريض بشكل مباشر. تم فحص المواد التي يصنع منها كم القياس ووجد بأنها تتوافق مع المعايير ISO 10993-5:2009 و ISO 10993-10:2010. لن يتسبب كم القياس بأية حساسية أو إصابة محتملة.

لا توجد حاجة الى معايرة الجهاز لمدة سنتين بعد منذ إستخدامه.

رجاء تخلص من الملحقات، الأجزاء القابلة للفصل، والأجهزة الطبية الإلكترونية وفقاً لإرشادات السلطات المحلية.

عندما تم يتم الجهاز لقياس ضغط الدم للأشخاص الذين يعانون من عدم إنتظام في نبضات القلب مثل الرجفان البطيني أو التبطضات البطينية المبكرة، قد يكون حاجة الى تعديل النتيجة.

رجاء استشر طبيبك عن هذه النتائج.

لا يجوز إستخدام هذا الجهاز من قبل النساء الحوامل.

بالإضافة الى عرض نتائج غير صحيحة، تأثيرات هذا الجهاز على الجنين غير معروفة.

♥ مركبات جهاز الضغط

قائمة مركبات جهاز قياس الضغط:

1. كم القياس
2. أنبوب الهواء
3. PCBA
4. مضخة
5. صمام

حجرة البطاريات

كم القياس

أنبوب الهواء

موصل أنبوب الهواء

مفتاح الاختيار بين المستخدمين

زر الذاكرة - MEM

زر البدء \ التوقيف

زر الضبط

شاشة LCD

♥ قائمة


3. 4 AAA بطاريات



2. كم القياس (نوع BF)
(22-42 سم)




1. جهاز لقياس ضغط الدم
TMB - 986

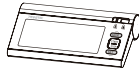


4. دليل المستخدم

♥ إشارة عرض شاشة الـ LCD

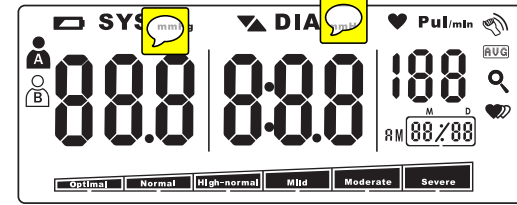


الإشارة	الوصف	شرح
SYS	ضغط الدم الإنقباضي	ضغط دم مرتفع
DIA	ضغط الدم الإنقباضي	ضغط دم منخفض
Pul/min	النبض	النبض \ الدقيقة
▼	تفريغ الهواء	إخراج أو زفر الهواء من الكم
AM 8:59	الوقت (الساعة: الدقائق)	الوقت الحالي
M 18/60	الذاكرة	إذا ظهر الحرف "M" يعني ذلك بأنه القيمة الظاهرة على الشاشة مصدرها الذاكرة. للتعليمات، راجع صفحة 11
mmHg	mmHg	وحدة قياس ضغط الدم 1mmHg
Lo	بطارية ضعيفة	البطاريات ضعيفة ويجب تبديلها
👉	لعدم تحريك	تحريك الجهاز سيؤدي الى نتائج خاطئة
Avg	معدل	معدل ضغط الدم
🔍	إعادة إظهار النتائج	سيتم عرض التسجيلات
❤️	الإشارة الى نبض قلب غير منتظم	الإشارة الى نبض قلب غير منتظم
A	المستخدم A	تم اختيار المستخدم A
B	المستخدم B	تم اختيار المستخدم B
Normal	الدرجة	درجة ضغط الدم رجاء عاين انظر 15 للمزيد من التفاصيل
M 88/88	التاريخ	"M" يشير الى الشهر، "D" يشير الى اليوم
❤️	نبض القلب	الكشف عن نبض القلب خلال قياس ضغط الدم

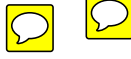


♥ ضبط التاريخ، الوقت


من المهم ضبط الساعة قبل البدء باستخدام جهاز قياس ضغط الدم، لكي يتم إرفاق الوقت لكل تسجيل يتم تخزينه في الذاكرة.
(السنة: 2000-2050، الوقت: )

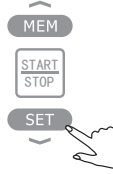

1. عندما يكون الجهاز غير شغال،
إضغط على زر الضبط "SET"
لمدة 3 ثواني لدخول وضعية ضبط
السنة

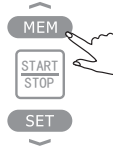

2. إضغط على زر الـ "MEM"
لتغيير السنة [YEAR]

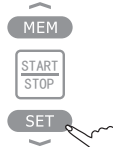

3. عندما تصل الى السنة الصحيحة.
إضغط على زر الضبط "SET"
للضبط والانتقال الى الخطوة التالية


♥ إختيار مصدر الطاقة

1. وضعية التشغيل بالبطاريات: 6 فولت تيار مباشر ، 4 بطاريات حجم AAA



للحصول على افضل أداء للجهاز ولحماية الشاشة ، رجاء إستخدم فقط بالبطاريات والمحول الكهربائي الذي يتوافق مع معايير السلامة .

♥ تثبيت وتبديل البطاريات

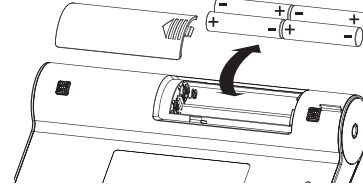

1. إفتح باب حجرة البطاريات
2. أدخل بطاريات جديدة بحسب الاقطاب.
3. أغلق حجرة البطاريات

قم بتبديل البطاريات في الحالات التالية:


- تظهر صورة الـ  على شاشة العرض- LCD
- يبدو ضوء الشاشة خافتاً.
- عندما تقوم بتشغيل الجهاز ، ولا تضئى شاشة العرض.




تحذير

- أزل البطاريات إذا لن تقوم باستخدام البطاريات الجهاز لفترة طويلة.
- البطاريات البالية خطر على البيئة. لا تقم برميها في النفايات المنزلية اليومية.
- أخرج البطاريات القديمة من الجهاز وقم بإعادة تدوير تكريرها وفقاً لتوجيهات السلطات المحلية.
- لا ترمي البطاريات في النار. يمكن للبطاريات ان تنفجر أو ان يحدث تسرب.

4. قم بالخطوات 2 و 3 لتأكيد الشهر [MONTH] واليوم [DAY].

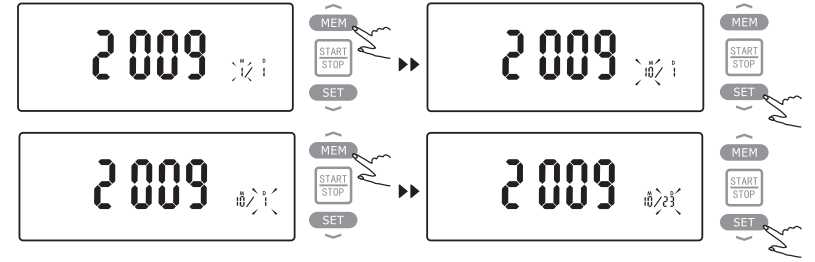

5. قم بالخطوات 2 و 3 لضبط الساعة [HOUR] والدقائق [MINUTE].

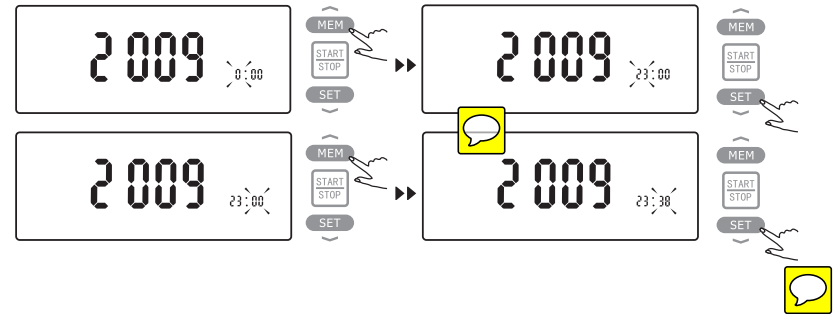

6. بعد تأكيد وحدات سيظهر على شاشة العرض "dOnE" ويتوقف الجهاز عن العمل.




♥ البدء بالقياس


♥ وضع كم القياس

START
STOP


1. عندما يكون الجهاز مطفئاً. إختَر المستخدم A أو المستخدم B. اضغط على **START STOP** لتشغيل جهاز القياس وسوف يقوم الجهاز بالقياس بأكمله تلقائياً.

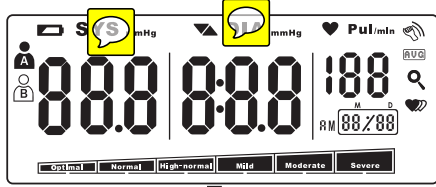


شاشة العرض- LCD

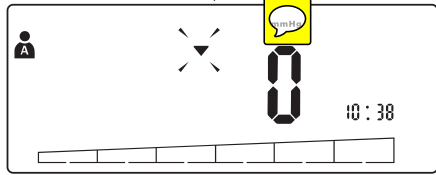

إضبطه للصفر

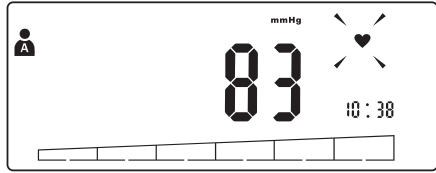


نفخ الكم والقياس

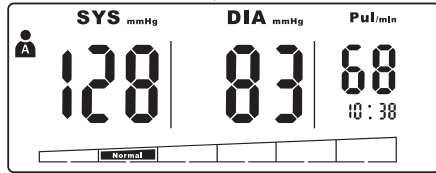

عرض وحفظ نتائج القياس

START
STOP


2. اضغط على **START STOP** لإطفاء الجهاز، وإلا سيوقف الجهاز تلقائياً عن العمل بعد مرور دقيقة واحدة.

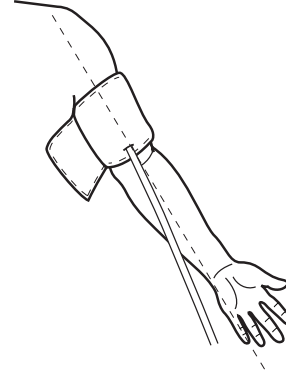

1. لف الكم من حول ذراعك، بحيث يكون فتحة أنبوب الهواء في الجهة العليا من الساعد وعلى خط واحد مع خنصرك.


2. يجب إحكام كم القياس لكن ليس بشكل قوي. يجب أن تتمكن من إدخال إصبع واحد ما بين كم القياس وذراعك.

3. اجلس بارتياح بحيث تكون يدك ممدودة فوق سطح أملس.

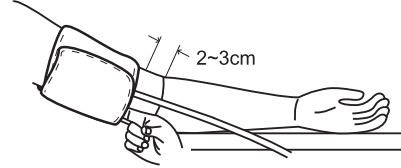

4. قم بتصحيح وضعية القياس للمرضى الذي يعانون من - اجعل ذراعك عارية أو ارتدي الجوملابس خفيفة فقط عند البدء بالقياس. - اجلس بارتياح ولا تلف قدمك فوق الأخرى، اجلس احتي وضع على الأرض، الظهر والذراع مسنودين يجب ان يكون مركز كم القياس على نفس مستوى الأذنين الأيمن للقلب.

• قم بالارتياح لـ 5 دقائق قبل البدء بقياس ضغط الدم. • أنتظر على الأقل 3 دقائق ما بين قياس وآخر. يسمح هذا لدورتك الدموية بالانتعاش مجدداً. لكي يكون بالإمكان المقارنة بين نتائج القياس، حاول القياس تحت نفس الظروف. • على سبيل المثال، قم بالقياس يومياً في نفس الوقت تقريباً، على نفس الذراع، أو بالشكل الذي وصفه لك الطبيب.


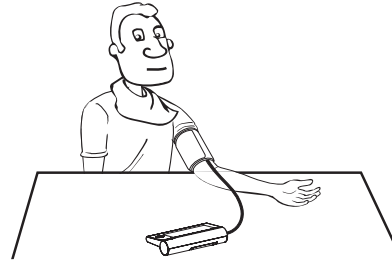


♥ حذف التسجيلات

♥ مراجعة التسجيلات

إذا لم تصل الى التسجيل الصحيح، يمكنك حذف كل النتائج باتباعك للخطوات التالية.


1. رجاء اختر المستخدم A أو المستخدم B عندما يكون الجهاز غير شغال، ثم اضغط على زر الذاكرة "MEM" لعرض معدل آخر ثلاثة قياسات لضغط الدم.

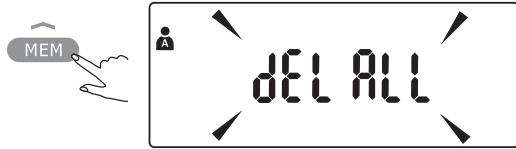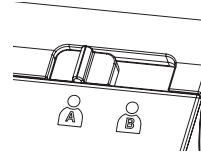


1. عندما يكون الجهاز غير شغال، اختر المستخدم A أو B، اضغط على زر الذاكرة "MEM" لمدة 3 ثواني، ستبدأ الشاشة بالوميض.




2. اضغط على زر الضبط "SET" للتأكيد على الحذف وبعدها ستوقف الجهاز عن العمل.

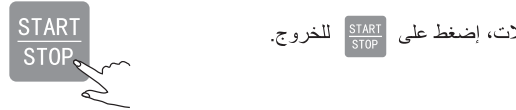


3. إذا كنت ترغب بحذف جميع التسجيلات، اضغط على 'START STOP' للخروج.

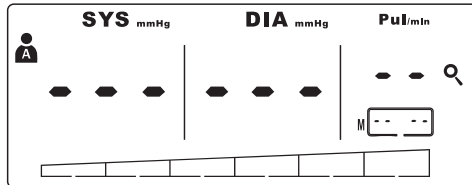

4. إذا لم يكن هناك أي تسجيلات ستظهر الشاشة الصحيحة عند الضغط على زر الذاكرة "MEM"

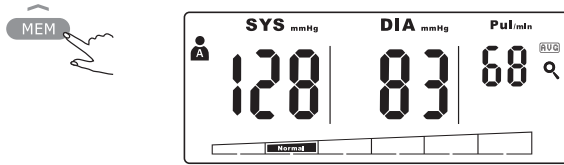

ستظهر إشارة المعدل - "AVG" في الزاوية اليمنى للجهاز

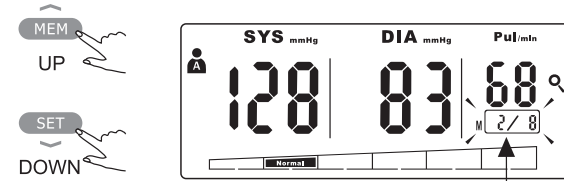

2. اضغط على زر الذاكرة "MEM" أو الضبط "SET" للوصول الى التسجيل الذي ترغب فيه.



التاريخ، والوقت سيظهر من مرة لأخرى.

ساعة الفحص هي: 10:38
تاريخ الفحص الـ 11 من شهر اكتوبر
يعني هذا أن مجمل القياسات هو 8 والقياس الحالي هو قياس رقم 2




تظهر أولاً أحدث (1) القياسات التي تم القيام بها.
كل تسجيل جديد سيحل مكان التسجيل الاخير (1).
كل التسجيلات سيتم دفعها لتسجيل واحد الى الامام (اي أن التسجيل رقم 2 سيصبح التسجيل رقم 3 وهم جره) جر وسيتم إسقاط التسجيل الاخير من الجهاز (60).
تحذير

♥ الصيانة


♥ نصائح للقياس

للحفاظ على عمل الجهاز على أفضل شكل ممكن، رجاء إتبع التعليمات التالية.


قد تتسبب بعدم دقة في النتائج إذا تم القياس في الحالات التالية.

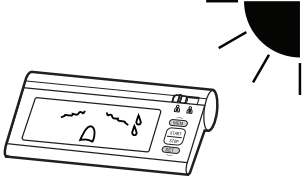

ضعه في مكان جاف وبعيدا عن ضوء الشمس.

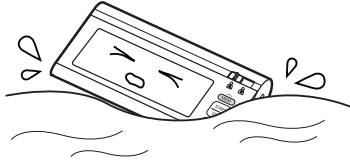


تجنب غمره بالماء.
قم بتنظيفه باستخدام قطعة قماش جافة عند الحاجة.

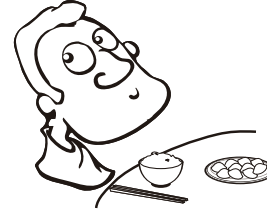


✗ خلال ساعة واحدة ما بعد الأكل أو الشرب.



✗ القياس مباشرة بعد شربك للشاي، القهوة أو ما بعد التدخين.

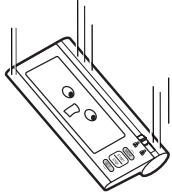

تجنب هزه أو صدمه.

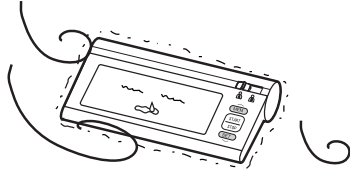


تجنب البيئة الكثيفة الغبار والمناطق التي تتميز بدرجات حرارة غير مستقرة.




✗ خلال 20 دقيقة ما بعد الإستحمام.



✗ عند الحديث أو عند تحريكك للإصابع.

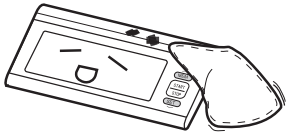

إستخدم قطعة قماش مبللة قليلا لإزالة الاوساخ عن الجهاز.

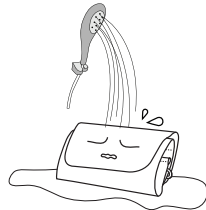

إمتنع عن غسل كُم القياس.




✗ في ظروف باردة جداً.



✗ عندما تريد ان تُقول.


♥ لماذا يختلف ضغط دمي على مدار اليوم؟

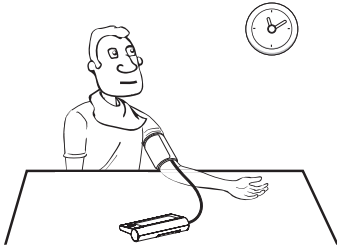

1. يتغير ضغط الدم على مدار اليوم، كما انها تتأثر بالطريقة التي تضع فيها كُم القياس ووضعية القياس، لهذا من المستحسن القيام بالقياس تحت نفس الظروف.
2. التغييرات في ضغط الدم ستكون اكبر إذا كان الشخص يتعاطى الادوية.
3. أنتظر على الأقل 3 دقائق ما بين قياس وآخر.

الأمور التي يجب الإنتباه إليها عند قياس ضغط الدم في البيت:


- إذا ما كان كُم القياس مشدودا كما يجب.
- إذا ما كان كُم القياس مشدود أكثر مما يجب او مرخي.
- إذا ما كان كُم القياس مثبتا على العضد (أعلى الذراع).
- إذا ما كنت تشعر بضغط مثير للقلق.
- من المستحسن ان تتنفس بعمق 2-3 مرات قبل البدء بالقياس.
- نصيحة: اضبط وضعتك ونفسك 4-5 دقائق الى أن نهذا قبل القياس.

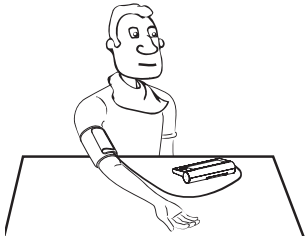

♥ إذا كانت النتيجة مشابه لتلك التي اقيسها على الذراع الايمن؟

يمكن قياس ضغط الدم على كلتا اليدين، لكن هناك اختلاف طفيف في النتائج فيما بينهم، لهذا ننصح بالقيام بالقياس على نفس الذراع يوميا.


♥ ما هو الضغط الإنقباضي والضغط الإنبساطي؟

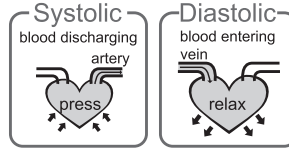

عند ينبض البطين ويضخ الدم من القلب، يصل ضغط الدم الى أعلى قيمة له في الدورة والتي تدعى بالضغط الإنقباضي. عندما ينبسط البطين، يصل ضغط الدم الى أدنى قيمة له في الدورة، والذي يدعى بالضغط الإنبساطي.

♥ ما هو التصنيف العام لضغط الدم؟

تصنيف ضغط الدم وفقا لما نشر على يد منظمة الصحة العالمية (WHO) والجمعية العالمية لفرط ضغط الدم (ISH) في سنة 1999:

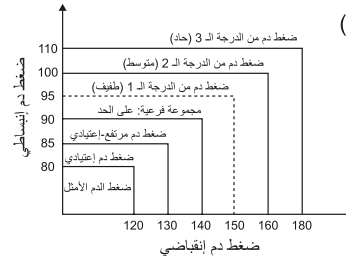

تحذير

فقط طبيب يمكن ان يخبرك ما هو مجال ضغط الدم الاعيادي. رجاء راجع طبيبك إذا كانت نتائجك تقع خارج المجال. انتبه الى أن يمكن فقط للطبيب ان يخبرك ما إذا وصلت نتائج قياس ضغط دمك لمستويات خطيرة.

المستوى	الأمثل	إعتيادي	مرتفع - إعتيادي	طفيف	متوسط	حاد
ضغط إنقباضي	<120	120-129	130-139	140-159	160-179	≥180
ضغط إنبساطي	<80	80-84	85-89	90-99	100-109	≥110

♥ الاشارة الى نبض قلب غير منتظم

جهاز قياس ضغط الدم مزود بوظيفة ذكية تُشير الى نبض قلب غير منتظم (IHB) خلال كل قياس، يقيس الجهاز الفرق الزمني ما بين نبضات القلب ويقوم بحساب الانحراف المعياري. إذا كانت القيمة التي تم حسابها اكبر او تساوي 15 سيظهر على الجهاز اشارة تشير الى نبض قلب غير منتظم (IHB) عند عرض نتائج القياس.

تحذير

ظهور إشارة نبض قلب غير منتظم تشير الى أنه قد تم الكشف عن نبض قلب غير منتظم خلال القياس. عادة لا حاجة الى القلق من هذه النتيجة. لكن، إذا ظهرت الإشارة أيضا في القياسات التالية، ننصحك بمراجعة الطبيب. نلفت إنتباهك الى أن الجهاز لا يعتبر بديلا لفحص القلب، إنما يستخدم للكشف عن نبض قلب غير منتظم في مراحل مبكرة.

يشمل هذا الفصل قائمة من رسائل الأخطاء والاسئلة التي عادة ما يتم طرحها للمشاكل التي يمكن ان تصادفها باستخدامك لجهاز قياس الضغط. إذا كنت تعتقد بان الجهاز لا يعمل كما يجب، إفحص هذه القائمة أولاً قبل ان تتوجه لخدمة الزبائن.

المصدر الكهربائي	وضعية التشغيل بالبطاريات: 6 فولت (4 بطاريات بحجم AAA)
وضعية العرض	شاشة LCD V.A. = 128mm(L) x 50mm(W)
وضعية القياس	وضعية إختبار الذئبة.
مجال القياس	الضغط: 300mmHg~0 قيمة النبض: (40-199) مرة الدقيقة
دقة النتائج	الضغط: 5 C - 40 C within ± mm Hg 3 قيمة النبض: ±5 %
ظروف التشغيل	درجة الحرارة: 5 C - 40 C الرطوبة النسبية ≥85% الضغط الجوي: kPa 86-106
ظروف التخزين والنقل	درجة الحرارة: 20 C - 60 C الرطوبة النسبية 10-93% الضغط الجوي: kPa 50-106
قياس محيط الذراع	قراءة الـ 22-42 سم
الوزن	قراءة الـ 320 غرام (لا يشمل البطاريات)
المقاييس الخارجية	قراءة الـ 39×100×182 ملم
مرفق	4 بطاريات AAA، دليل المستخدم
وضعية التشغيل	تشغيل مستمر
شدة الحماية	اجزاء BF مرفقة
الحماية من تسرب المياه IP	IP21
الحماية من تسرب المياه IP	V01

المشكلة	العوارض	إفحص هذا	الحل
لا يوجد طاقة كهربائية	الشاشة لن تعمل	البطاريات فارغة.	قم بوضع بطاريات جديدة
		تم أدرج البطاريات بشكل خاطئ	أدرج البطاريات كما يجب.
بطارية ضعيفة	الشاشة خافتة أو تظهر اشارة ± 1.0 على الشاشة	البطاريات ضعيفة	قم بوضع بطاريات جديدة
رسائل الأخطاء	تظهر رسالة الخطأ E1	الكم غير محكم	أعد إحكام كم القياس وقم بالقياس مجدداً.
	تظهر رسالة الخطأ E 2	الكم محكم بشكل مبالغ فيه	أعد إحكام كم القياس وقم بالقياس مجدداً.
	تظهر رسالة الخطأ E 3	تم تجاوز الضغط الذي يمكن ان يتحملة كم القياس	إسترخي لمدة دقيقة وبعدها قم بالقياس مجدداً.
	تظهر رسالة الخطأ E 10، أو E 11	كشف الجهاز عن حركة أثناء القياس.	يمكن للحركة ان تؤثر على القياس. إسترخي لمدة دقيقة وبعدها قم بالقياس مجدداً.
	تظهر رسالة الخطأ E 20	لم يتم العثور على نبض خلال عملية القياس.	إكشف عن اليد او تخلص من بعض الملابس وأعد القياس مجدداً.
	تظهر رسالة الخطأ E 21	فشلت عملية القياس.	إسترخي لمدة دقيقة وبعدها قم بالقياس مجدداً.
	يظهر الرمز EExx على الشاشة.	حدث خطأ في معايرة الجهاز	أعد القياس مجدداً. إذا إستمرت المشكلة، إتصل بالوكيل المعتمد أو بخدمة الزبائن للحصول على المساعدة. راجع الكفالة لتفاصيل الإتصال والتفاصيل لإعادة الجهاز.

♥ تفاصيل الإتصال

للمزيد من المعلومات بخصوص منتجاتنا، الرجاء زيارة www.transtek.cn يمكنك الحصول على خدمة الزبائن، مشاكل عادية وتنزيل مواد، سوف نخدمك ترانستيك في أي وقت.

مصنع من قبل: GUANGDONG TRANSTEK MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD
الشركة: GUANGDONG TRANSTEK MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD
العنوان: Zone A, No.105 ,Dongli Road, Torch Development District, Zhongshan, 528437, Guangdong, China

المستورد: دين دياغنونستيكا م.ض
العنوان: شارع هابيشل 7 كيسانيا
هاتف خدمة الزبائن: 1800-333-636

مسفد ريشوم بفنكس האמ"ר: 2660511
שם האמ"ר:
Transtek TMB-986 Blood Pressure Monitor
מכשיר למדידת לחץ דם

♥ قائمة المعايير الاوروبية المطبقة

EN/ISO 14971:2007	تدبير الخطر
EN 15223-1:2012	التسمية
EN 1041:2008	دليل المستخدم
EN 60601-1:2006/AC2010 EN 60601-1-11:2010	متطلبات عامة للسلامة
EN 1060-1:1995 + A2:2009 EN 1060-3:1997 + A2:2009 EN 1060-4:2004	متطلبات غير اجتياحية لاجهاز قياس ضغط الدم
EN 60601-1-2:2007 / AC:2010	التوافق الكهرومغناطيسي
EN 62304:2006 / AC:2008	مدة حياة البرنامج الحاسوبي
EN 60601-1-6:2010 EN 62366:2008	الاستعمال

♥ دليل الـ EMC

1. المعدات الكهربائية الطبية تحتاج الى إحتياطات خاصة بكل ما يتعلق بالـ EMC ويجب وضعها وصيانتها بحسب تعليمات ووثائق الـ EMC المرفقة للجهاز
 2. معدات الاتصالات اللاسلكية مثل الأجهزة اللاسلكية الشبكة المنزلية، والهواتف المحمولة، والهواتف اللاسلكية ومحطات قاعدتهم، لاسلكي يمكن أن تؤثر هذه المعدات على عمل الجهاز ويجب أن تبقى على الأقل مسافة 3 أمتار (d=3) عن الجهاز
- (ملاحظة: كما هو مبين في الجدول رقم 6 من IEC 60601-1-2: 2007 ME EQUIPMENT)
الهاتف الخليوي نموذجي مع انتاج الطاقة القصوى يساوي الـ 2 واط يتصل الى 3 م (d=3) وعلى مستوى حصانة يساوي 3 فولت للمتر الواحد)